

A woman with blonde hair tied back, wearing white medical scrubs, is holding a small, white, square-shaped medical device with both hands. The device has a black label with 'SO*CONNECT+' and 'V1.1.0' printed on it. The background is plain white.

SO*CONNECT+

Innrennslisdæla fyrir
meðferð undir húð
heima – með
snjalltækni



nordic
INFUcare

Dreifingaraðili • www.infucare.com

SO♥CONNECT+ flytjanleg innrennslisdæla fyrir innrennslismeðferð* undir húð. Ein dæla fyrir þrjár sprautustærðir: 20, 30 og 50 mL.



NOTENDA VÆN

Innsæis hönnun til að auðvelda notkun



SVEIGJANLEG

3-í-1, ein dæla fyrir þrjár sprautastærðir



SNJÖLL TÆKNI

Snertiskjár og Bluetooth**

SO♥FYLLA
SPRAUTUR
má ávísa



73 83 15
SO♥FYLLING 30mL
32 á hvern pakka



73 83 16
SO♥FYLLING 50mL
32 á hvern pakka



73 83 14
SO♥FYLLING 20mL
32 á hvern pakka

* Sjá notkunarleiðbeiningar fyrir ábendingar og fráþendingar. ** Hægt er að flytja út klínísk gögn, sjá notkunarleiðbeiningar fyrir nánari upplýsingar.

SO♥CONNECT+

ÞRJÁR SPAUTUSTÆRÐIR

SO♥FYLLINGAR 20, 30 og 50 mL

SKYNJARI FYRIR SPRAUTUNA

Dælan gefur frá sér
viðvörðun ef sprautuna
vantar

SNERTISKJÁR

Fylgdu meðferðinni með
tími og rúmmál sem eftir er.



STAÐALL LUER-LÁSA FESTING

Passar á öll innrennslisett
með staðalbúnaði.

HLAÐANLEG RAFHLAÐA

SO♥POWER+ með
ytri hleðslu.

VIÐHALD

Ekki er þörf á
fyrirbyggjandi viðhaldi.

SO♥CONNECT+ BYRJENDASETT

vörunúmer.: 91 00 50

HLEÐSLUTÆKI

Innifalið kapall, 1 ea

RAFLAÐA

SO♥POWER+

3.7V lithium, 2 ea

DÆLA

SO♥CONNECT+

Innrennslisdæla

LEIÐBEININGAR TIL NOTKUNAR

Fjögur norræn
tungumál 1 ea

AUKAHLUTIR*

SO♥MOVE+ dæluhylki | hálsól | teygjanlegt mittisbelti | SO♥EASY fyllingarskrúfa

*Pantað sérstaklega



1

STILLA DÆLUNA

Með nokkrum einföldum skrefum er hægt að stilla magn lyfja og hversu langan tíma meðferðin á að taka. Veldu á milli ein- og fjölstillinga.



2

TAKA UPP LYF INN ÍSO♥FYLLINGAR SPRAUTUNA

SO♥FYLLING er með innsigli í kring stimpilstöngina sem kemur í veg fyrir lyfjagjöf lekur úr sprautunni.



3

TENGDU SPRAUTUNA

Festið sprautuna við dæluna með einni aðgerð.



4

HEFJA MEÐFERÐ

Ýttu á START til að hefja innrennslið. Ef sprautuna vantar kemur viðvörðun.

Fyrir meira
upplýsingar:
info@infucare.se
+46 (0)8-601 24 40

sprautuhjarta

Nordic Infucare býður upp á einstaka blöndu af lækningatækjum, lyfjum og þekkingu fyrir börn og fullorðna á heimili sínu. Teymi okkar hafa mikla reynslu af mismunandi þáttum lyfjameðferðar undir húð. Nordic Infucare leggur áherslu á langvinna og sjaldgæfa sjúkdóma eins og ónæmisbrest, blóðleysi sem er háð blóðgjöf, sykursýki, Parkinsonsveiki, lungnaslagæðaháþrýsting (PAH), verki og öndunarhjálp.

DANMÖRK: Industrivej 21 • 4000 ROSKILDE • +45 70 28 10 24 • info@infucare.dk

NOREGUR: Blindernveien 5 • 0361 OSLO • +47 22 20 60 00 • info@infucare.no

FINNLAND: Tekniikantie 14 • 02150 ESPOO • +358 207 348 760 • info@infucare.fi

SVÍP-JÓÐ: Box 14026 • 167 14 BROMMA • +46 8 601 2440 • info@infucare.se



France Développement Électronique
46 rue du Zornhoff, 67700 Monswiller, FRANCE
Tel: +33 (0)3 88 91 87 55


Dreifingaraðili • www.infucare.com