

SKREF FYRIR SKREF

SO♥CONNECT+ innrennsliðsdæla

Þetta efni kemur ekki í stað upplýsinganna og þjálfunar sem þú hefur fengið frá heilbrigðisstarfsfólki.

i^{nordic}
INFUcare
Dreifingaraðili • www.infucare.com



1 ÞVOÐU ÞÉR UM HENDURNAR og finndu hreint yfirborð.



2 TAKTU ÚT DÆLU OG AUKAHLUTI Opnaðu pakkningarnar með lyfinu, sprautunni, innrennslissettinu og fylgihlutum.



3 SÓTTGREINSAÐU GÚMMÍHIMNUNA á hettuglasinu með lyfinu¹.



4 SETTU ÁFYLLINGARNÁLINA

inn í gúmmíhimnuna.



5 UNDIRBÚA SKAL² SO[♥] ÁFYLLINGAR-SPRAUTUNA

og skrófaðu hana á áfyllingarnálina.


Dragðu lyfið hægt upp í sprautuna.

Fylgdu alltaf leiðbeiningum læknisins.



6 SKRÚFAÐU INNRENNSLISSETTIÐ ÞÉTT Á SPRAUTUNA

Fylltu innrennslisstaðinn fyrirfram samkvæmt leiðbeiningum heilbrigðisstarfsfólks.

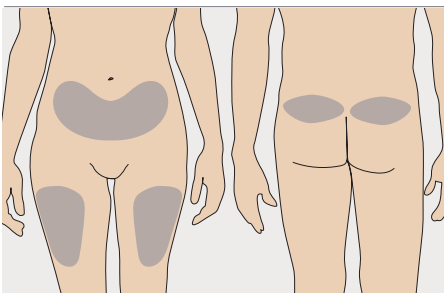

7 VELDU RÉTTAN INNRENNSLISSTAÐ

Sjá merkingar á myndinni.³



Dæmi neria™ multi





Dæmi neria™ guard

8 SETTU INNRENNSLISSETTIÐ Á

Klíptu létt í fitu undir húð og stingdu beint inn í við 90°. ^{3, 4}

Þrýstu líminu á húðina.

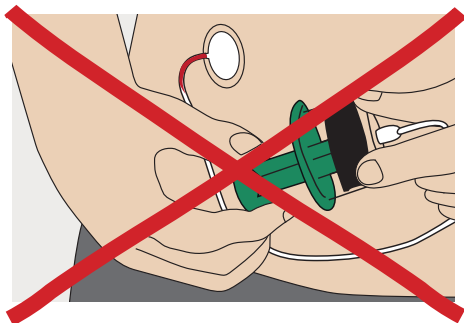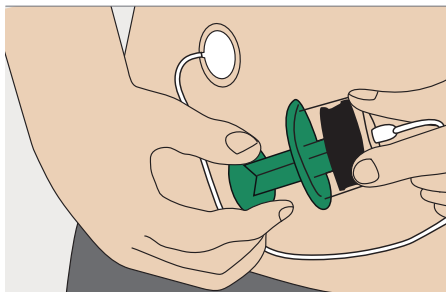


9 ÖRYGGISATHUGUN

Þegar þú hefur fest innrennslisettið á, þarftu að ganga úr skugga um að þú hafir ekki gatað æð.

- a) Sogaðu, dragðu stimpilinn aftur. Athugaðu hvort blóð birtist í slöngunni við hlið nálarinnar.
- b) Losaðu síðan sprautuna úr innrennslisettinu í 10-15 sekúndur. Athugaðu aftur hvort blóð kemur í slönguna við hlið nálarinnar.
- c) Þegar öryggisathugun hefur verið framkvæmd skal skrífa innrennslisettið aftur á sprautuna.

Ef blóð kemur í ljós hefur þú fyrir mistök stungið í æð. Dragðu nálina út, fargaðu henni og endurtaktu ferlið samkvæmt liðum 6-8 með nýju innrennslisetti og nýjum ísetningarstað og framkvæmdu öryggisathugunina⁴ samkvæmt 9. tölulið.

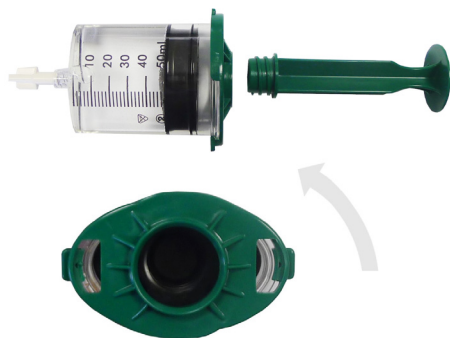

10 SKRÚFAÐU STIMPILSTÖNGINA RANGSÆLIS AF


sprautunni, láttu alltaf græna toppinn á stimplinum vera á sínum stað á sprautunni þar til stimpilstöngin losnar. Fjarlægðu síðan toppinn af stimplinum af sprautunni með því að snúa henni rangsælis.²

Bíddu áður en sprautan er fest við dæluna. Þetta er ekki gert fyrr en í skrefi **12 D**.




11 KVEIKTU Á DÆLUNNI Á ON/OFF TAKKANUM FYRIR NEÐAN


12 BYRJAÐU INNRENNSLIÐ

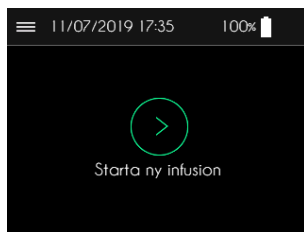


A: ÝTTU Á „BYRJA NÝTT INNRENNSLIÐ“

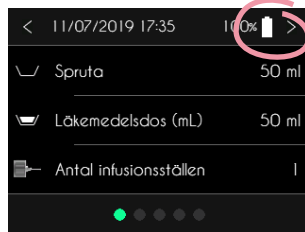


B: ATHUGAÐU STILLINGARNAR
Staðfestu með ýttu á > eða V efst til hægri.

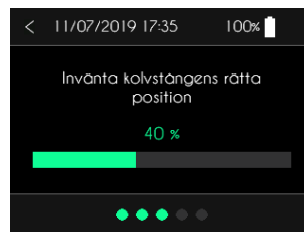


C: STIMPILSTÖNGIN FÆRIST UPP Í RÉTTA STÖÐU

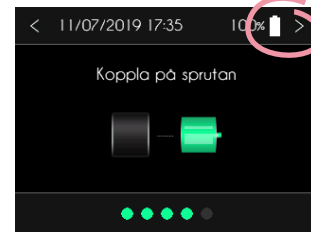

D: TENGDU SO-FYLLINGARSPRAUTU²
skáhallt á dæluna.
Snúðu sprautunni réttsælis þar til hún smellur í stöðuna.
Staðfestu með því að ýta á > eða V efst til hægri.

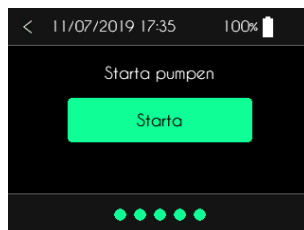


E: BYRJAÐU INNRENNSLIÐ MEÐ ÞVÍ AÐ ÝTA Á „START“

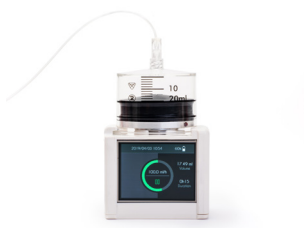

Innrennslið er nú hafið.
Ef þú þarft tæknilega aðstoð, hafðu samband við NordiC Infucare +46 8 601 24 40

13 KLÁRA INNRENNSLIÐ

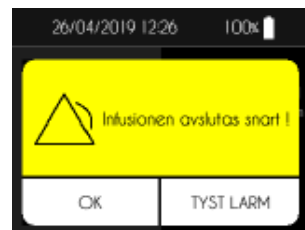

A: INNRENNUNNI LÝKUR HRATT
Það heyrir hljóðmerki.
Staðfestu með OK í 2 sek.



B: INNRENNSLI LOKIÐ
Það heyrir hljóðmerki.
Staðfestu með OK í 2 sek. Láttu sprautuna vera í stöðu þar til stimpilstöngin hefur verið dregin alveg til baka.

C: FJARLÆGÐU SPRAUTUNA FRÁ DÆLUNNI
Snúðu sprautunni rangsælis og dragðu beint upp. Fargið plasti og oddhvössum hlutum samkvæmt leiðbeiningum heilbrigðisþjónustunnar.

Lestu alltaf notkunarleiðbeiningar dælnnar til að fá allar upplýsingar

SVÍPJÓÐ +46 8 601 2440 • info@infucare.se
FINNLAND: +358 207 348 760 • info@infucare.fi
NOREGUR +47 22 20 60 00 • info@infucare.no
DANMÖRK: +45 70 28 10 24 • info@infucare.dk



France Développement Électronique
46 rue du Zornhoff, 67700 Monswiller
FRANKLAND
Simi: +33 (0)3 88 91 87 55

nordic
INFUCARE
Dreifingaraðili • www.infucare.com